

PE バキュームチップ ゴム付


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

φ10mm (モリタ仕様) 用とφ11mm 用の2種類があります。先端ゴムはφ10用がセットされています。

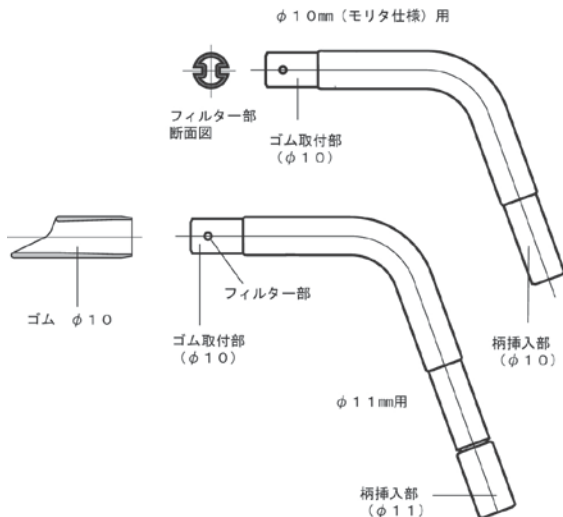

材質

PEバキュームチップ; ポリエチレン樹脂
 ゴム; シリコンゴム

【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置 (通常、歯科専用装置) に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いるものをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

先端ゴム取付部にゴムを挿入します。ゴムはφ10mm (モリタ仕様) 用を使用してください。(セット済み)
 柄挿入部は2種類のサイズがあります。サイズが合ったものをご使用ください。
 操作法は金属製と変わりません。

滅菌方法

耐熱性はありませんのでオートクレーブ・ドライクレーブは適しません。その他の滅菌方法で行ってください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・包装材が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと。また、折損等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力 (応力) を加えないこと。
- ・本品はディスポーザブル製品であるため1回限りの使用のみとすること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

有効期間

有効期限・保証期間はありません。
 納品時の不良以外は一切責任は負えません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者: 株式会社センジョー
 製造業者: 株式会社センジョー