

ニューサライバーZ

【形状・構造及び原理等】

本品は、メタルチューブとバキュームチップからなる器具である。

組成

本品は次の原材料で構成する。


- ・メタルチューブ；(原材料名) ステンレス鋼
- ・シリコンチップ；(原材料名) シリコンゴム

【使用目的又は効果】

非電動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いるものをいう

シリコンチップはワンタッチで自由に長さが変えられるので、各人各様の口腔に対応できます。専用アダプターを使用し、バキュームラインに接続することにより、吸引力を大幅にアップできます。効果的に使用すれば、バキュームのアシストが不要とすることがあります。

【使用方法等】

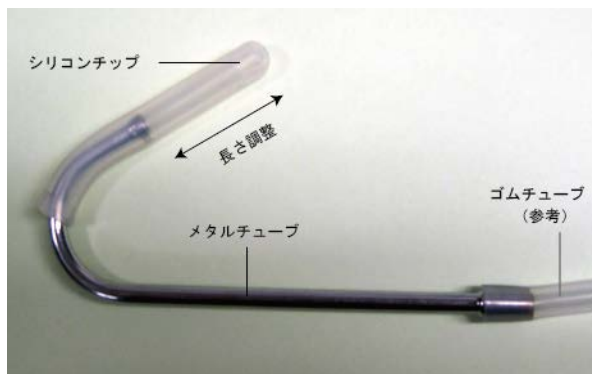

先端取付部にシリコンチップを挿入します。チューブ取付部に排唾管チューブ等に連結させます。シリコンチップを適切な長さに調整し、口腔内の適用部位に留置し、使用します。

接続方法

- (1) サライバーエジェクターにメタルチューブを直接差込んで使います。
- (2) φ16mm および φ11mm のバキュームシリンジには、別売の接続アダプターを使用して接続してください。
- (3) φ10mm (モリタ仕様) のバキュームシリンジには、別売の φ10-φ11 アダプターと接続アダプターを組み合わせて接続してください。

再使用のために必要な処置

使用後はコップ一杯の水を吸わせ、シリコンチップを外し、超音波洗浄器等を用いて、吸引されたものが内部に残留しないように洗浄すること。その後、適法により薬液滅菌、煮沸消毒又はオートクレーブ滅菌を行うこと。シリコンチップの消毒・滅菌後、乾燥を行う場合は、140℃を超えないようにすること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

包装材が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

使用方法に関連する使用上の注意

シリコンチップをメタルチューブに差し込んでから、使用してください。シリコンチップを水につけてから差し込むとスムーズに動きます。(使用中、シリコンチップがスムーズに動かなくなったときは、水を吸わせてください。)

舌や粘膜が吸い込まれるときは、シリコンチップの先端をガーゼでカバーしてください。

チューブとの連結は、治療中に抜けないことを確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

シリコンチップは、殺菌等（紫外線ランプ）を点灯したキャビネットに保管しないこと。

メタルチューブは「もらいさび」を防ぐため、さびている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

有効期間

有効期限・保証期間はありません。

納品時の不良以外は一切責任は負えません。

シリコンチップは硬化・亀裂等の劣化が見られたら交換してください。

メタルチューブはステンレス製ですが、使用方法・環境によって腐食（錆び）することがあります。亀裂・腐食がみられた場合は交換してください。

【主要文献及び文献請求先】

主要文献

日本歯科評論 No.679 別冊 バキュームのアシストなしでの診察を可能にした新型排唾管の開発（小田部誠治著）

文献請求先

関連資料は「おたべ歯科」のホームページからお取りください。または弊社までお問い合わせください。

納品時の不良以外は一切責任は負えません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社センジョー

製造業者：株式会社センジョー