

## スーパーサライバーZ

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、メタルチューブとバキュームチップからなる器具である。

#### 組成

本品は次の原材料で構成する。

- ・メタルチューブ；(原材料名) ステンレス鋼
- ・シリコンチップ；(原材料名) シリコンゴム

### 【使用目的又は効果】

非能動型の吸引装置(通常、歯科専用装置)に連結して用いる管状の歯科用器具をいう。口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本品は滅菌後に再使用する。

シリコンチップはワンタッチで自由に長さを変えられるので、各人各様の口腔に対応できます。

専用アダプターを使用し、バキュームラインに接続することにより、吸引力を大幅にアップできます。

効果的に使用すれば、バキュームのアシストが不要とすることができます。

### 【使用方法等】



先端取付部にシリコンチップを挿入します。

チューブ取付部をサライバーエジェクター等に連結させます。シリコンチップを適切な長さに調整し、口腔内の適用部位に留置し、使用します。

舌や頬を圧排する場合は短くして使用してください。

#### 接続方法

[http://www.senjo.co.jp/file/11/newsaraiva\\_tebiki.pdf](http://www.senjo.co.jp/file/11/newsaraiva_tebiki.pdf)

上記アドレスより「ニューサライバーZ 接続の手引き」を入手にしてください。

#### 操作例図



### 再使用のために必要な処置

使用後はコップ一杯の水を吸わせ、シリコンチップを外し、超音波洗浄器等を用いて、吸引されたものが内部に残留しないように洗浄すること。

その後、通法により薬液滅菌、煮沸消毒又はオートクレーブ滅菌を行うこと。

シリコンチップの消毒・滅菌後に乾燥を行う場合は、140℃を超えないようにすること。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

包装材が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

#### 使用方法に関連する使用上の注意

シリコンチップをメタルチューブに差し込んでから、使用してください。シリコンチップを水につけてから差し込むとスムーズに動きます。(使用中、シリコンチップがスムーズに動かなくなったときは、水を吸わせてください。)

舌や粘膜が吸い込まれるときは、シリコンチップの先端をガーゼでカバーしてください。

チューブとの連結は、治療中に抜けないことを確認してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

シリコンチップは、殺菌灯(紫外線ランプ)を点灯したキャビネットに保管しないこと。

メタルチューブは「もらいさび」を防ぐため、さびている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

#### 有効期間

有効期限・保証期間はありません。

納品時の不良以外は一切責任は負えません。

シリコンチップは硬化・亀裂等の劣化が見られたら交換してください。

メタルチューブはステンレス製ですが、使用方法・環境によって腐食(錆び)することがあります。亀裂・腐食がみられた場合は交換してください。

### 【主要文献及び文献請求先】

#### 主要文献

デンタルダイヤモンド(2012年6月号)新・臨床に役立つすぐれモノ「スーパーサライバーZ」(小田部誠治著)

#### 文献請求先

別冊が弊社にありますのでご請求ください。

または弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.senjo.co.jp>

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社センジョー

製造元：株式会社センジョー