

ダイカホルダー

【形状・構造及び原理等】

材質

ABS樹脂



上顎模型・下顎模型は分離できます。
側方運動が再現できますので、簡単な咬合形式の分析ができます。

【使用目的又は効果】

蝶番付き歯科用器具をいい、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付ける。
下顎運動の一部又は全部をシュミレートするように設計されている。

【使用方法等】

下顎模型は本体に直接取り付けます。
上顎模型を上顎用ホルダーに取り付けます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

包装材が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

その他の注意

ABS樹脂製です。耐熱性はありません。
熱湯での洗浄はしないで下さい。
また、シンナー等の有機溶剤等で拭いたりしないでください。

【保管方法及び有効期限等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

有効期間

有効期限・保証期間はありません。
納品時の不良以外は一切責任は負えません。